

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療器機  
JMDN70907000 歯科用研磨器材  
**ブライトサンド**

**【形状・構造等及び原理】**

形状 粉体（粒状）

主成分 シリカ

**【使用目的、効能又は効果】**

補綴物等の研磨に用いる器材

本品は主に義歯床に使用されるレジン等樹脂の整形研磨に用いる。

**【品目仕様等】**

色調 アイボリー（中間研磨粒子）

**【操作方法又は使用方法】**

- ブライトサンドに等量の水道水を加える
- ブライトサンド約両手一杯に対しブライトサンドローションをティースプーン約1杯を添加し、かき混ぜる  
ブライトローションの量は好みの粘性により加減する。
- レーズを用いてブライトホイール、布バフ又はブラシで2のスラリー状の本品をデンチャー樹脂部に掛けながら研磨をする
- 表面が滑らかになったら研磨を終え、水洗いをし本品を洗い落とす。

研磨方法は通常の方法をとる

**【使用上の注意】**

本品の取り扱い時、又は研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、又は必要に応じ公的機関が許可したマスク、保護ゴーグル等を使用すること

本製品は【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

**重要な基本的注意**

本品使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた術者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期限】**

歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること  
湿気の無いところに保管する。

**【包装】**

3kg/箱

6箱入/バッキンケース

**【製造業者、製造販売業者及び住所等】**

製造販売元 株式会社美須化学研究所

製造元 同

住所 〒542-0012

大阪市中央区谷町6丁目2番11号

電話番号 06-6761-4092(代)