

歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器  
JMDN70907000 歯科用研磨器材  
レジンポリ

【形状・構造等及び原理等】

形状 円柱状

主成分 アルミナ シリカ ロウ

【使用目的、効能又は効果】

歯科用研磨器材補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く

本品は主に床・義歯等に使用されるレジンの仕上げを目的とする研磨材である。

【品目仕様等】

識別 ピンク色（仕上げ研磨用粒子）

【操作方法又は使用方法等】

1. デンチャーをペーパー、マイクロポリで整形研磨する
2. レーズを用いて本品をバフに少量付ける
3. 軽く掃くように研磨する
4. 洗剤等を用い本品を完全に洗い落とす
5. 十分に水洗いをする

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

研磨後は十分に洗浄を行い本品を完全に洗い落とすこと

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

本製品は【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意

本品使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

本品使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限】

直射日光や暖房器具などの温風の吹き出し口を避け、室温で保管すること。

歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること。

【包装】

1本/円柱状 紙ラベル、シュリンク包装

5本入り/紙箱 (BOX)

10BOX/段ボール箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 株式会社美須化学研究所

製造元 同

住所 〒542-0012

大阪市中央区谷町6丁目2番11号

電話番号 06-6761-4092(代)