

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器
JMDN70907000 歯科用研磨器材
レジンポリブルー

【形状・構造等及び原理等】

形状 ベースト状
成分 アルミナ 鉱物油 植物油 水

【使用目的、効能又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材
本品は義歯に使用されるレジン系及び金属の仕上げ研磨材

【品目仕様等】

色調 ブルー（仕上げ研磨用粒子）

【操作方法又は使用方法】

1. 砂整形研磨後のデンチャーを水洗いする
2. 水滴の付いた状態で本品を多めに塗布する
3. レーズを用いて軽く掃くように研磨する
4. 超音波洗浄後水洗いをして本品を完全に洗い落とす

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

研磨後は十分に洗浄を行い本品を完全に洗い落とすこと

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

本製品は【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意

本品使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

本品使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限】

キャップを締め立てた状態で保存する。
歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること

【包装】

内容量：220g包装 軟膏容器充填

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 株式会社美須化学研究所
製造元 同
住所 〒542-0012
大阪市中央区谷町6丁目2番11号
電話番号 06-6761-4092(代)