

歯01 歯科用金属

管理医療器械

JMDNコード70797000 歯科非铸造用合金

ビス補強床

【禁忌・禁止】

本品を樹脂の外に露出しないこと。

【形状・構造等及び原理】

形状 網目

上顎

下顎



【原材料又は構成部品】

成分

銅60% 亜鉛40%

表面 金メッキ

【使用目的、効能又は効果】

義歯床樹脂の中に埋め込み義歯の補強を目的とする。主として
歯科用修復物及び器材の作製に用いる。

【品目仕様等】

上顎型

下顎型

【操作方法又は使用方法】

- (1) 石膏模型鑄型に補強床を圧接する。
- (2) 圧接した補強床を型より取り出し、型よりはみ出る部分をカットする。
- (3) 石膏模型鑄型に樹脂を伸ばす。
- (4) 形成加工した補強床を樹脂を伸ばした石膏型の上に乗せる。
- (5) 樹脂と補強床を乗せた石膏型の上に更に樹脂を乗せ圧接する。
(サンドイッチにする)
- (6) 仕上がり後、樹脂より露出した補強床の部分があれば即樹脂で埋める。

『使用上のポイント』

補強床を樹脂でサンドイッチのように加工する事で補強床が露出せず、樹脂の内部に上手く埋め込むことができます。
ハサミで切ることができます。

その他は通常の技工法にて作成して下さい。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

本品の削除研磨作業の際は、粉塵による人体への影響を避けるため使用上の注意をよくお読み下さい。

【使用上の注意】

(1)使用注意

レジン樹脂より露出してはならない。
(露出部分より変色の恐れがあります。)

本製品を加工する時出来るだけ素手で持たない(ビニルや手袋使用)。又は加工前に石けんで手洗いをして下さい。(本品に手の油分等が付着すると変色の恐れがあります。)

石膏模型圧接時に石膏に水分が残っていると、本品に変色の恐れがあります。十分に乾かしてから加工して下さい。

本品に水分を付着させないでください。変色の恐れがあります

本品の表面を研磨しないでください。金メッキが剥がれます。

製法上、本製品には鋭利な部分が出るのでお取り扱い時にご注意下さい。

本品の研削作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

本製品は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること

包装ビニル袋に入れ密封の上、腐食性薬品等避け湿気の無い場所に保存してください。

【包装】

上顎 2枚ビニル包装×5組/函

下顎 2枚ビニル包装×5組/函

上下顎各1枚ビニル包装×5組/函

【製造販売業者及び製造業者の住所等】

製造販売元 株式会社美須化学研究所

製造元 同

住所 〒542-0012

大阪市中央区谷町6丁目2番11号

電話番号 06-6761-4092(代)